

Brandenburg an der Havel, 04.10.2023

Laborinformation 11/23

Wir sind auf Ihre Mithilfe angewiesen!

Sehr geehrtes Praxisteam,

zur Bestimmung von Glukose im Blut verwenden Sie in Ihrer Praxis Glucoexact-Röhrchen der Firma Sarstedt. Eine bereits dem Röhrchen zugesetzte Flüssigpräparation von Natriumfluorid-Citrat sorgt für die effektive Hemmung der Glykolyse. Das korrekte Mischungsverhältnis von Blut und Zusatz gewährleistet einen verlässlichen Messwert. Somit ist es erforderlich, bei **Glucoexact-Röhrchen** auf ein **Füllvolumen bis zur Markierung** (schwarzer Strich auf Sarstedt-Etikett) zu achten. Unterfüllte Röhrchen werden in unserem Labor nicht bearbeitet.

Es versteht sich von selbst, dass sämtliche Blutentnahme-Röhrchen zur eindeutigen Identifizierung mit einem Barcode-Etikett beklebt sein müssen. Um ein zügiges Bearbeiten Ihrer Probe sicherzustellen, bitten wir Sie auf folgende Dinge zu achten:

(1) Ein exaktes **Füllvolumen bis zur Markierung** der **Glucoexact- und Gerinnungs-Röhrchen** gewährleistet einen verlässlichen Messwert.

(2) Ein kleines **Sichtfenster** zwischen Barcode und Röhrchenetikett ermöglicht auf einem Blick, den Inhalt und Füllstand des Blutentnahmeröhrchens zu beurteilen.



(3) Ein **senkrecht und mittig orientierter Barcode** garantiert, dass Barcodescanner, die an sämtlichen Arbeitsplätzen und Geräten des Labors verwendet werden, das Etikett problemlos auslesen können.

(4) Ein eingerasteter Röhrchenkolben und eine vollständig **abgebrochene Kolbenstange** verhindern schwerwiegende Defekte an unseren Geräten.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Für weitere Informationen erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 03381-412444.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Tregel
Ltd. Oberarzt / Kommissarisch ärztliche Leitung

Jessica Vogler
Biologin